


DR. ÁNGEL LUIS SIERRA:

“INDIBA® Deep Care se beneficia del propio calor endógeno del cuerpo, lo que aumenta la eficacia y evita quemaduras”

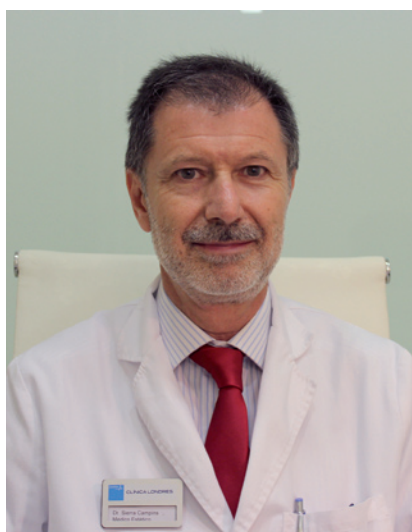

El Dr. Ángel Luis Sierra lleva 25 años dedicado a la Medicina Estética. Ha realizado miles de tratamientos faciales y corporales y formado a multitud de médicos. Es profesor y tutor en la Fundación Universidad Francisco de Vitoria; coordinador del Área Sanitaria de CETYS en esta Fundación y médico referente en Medicina Estética facial y corporal de Clínica Londres. Autor-colaborador del libro “Medicina Estética. Abordaje terapéutico”. (Editorial Médica Panamericana) 2011.



Imagen: INDIBA® Deep Care

Para qué

Empleamos INDIBA® Deep Care fundamentalmente para tratamientos de reafirmación y contra la celulitis. Lo utilizamos para tratar la flacidez de cualquier parte del cuerpo: rostro, cuello, brazos, pecho, abdomen, cartucheras, nalgas... así como para la remodelación corporal (incluido postparto) y como tratamiento postquirúrgico para la reducción de la inflamación y los hematomas y aceleración del proceso de cicatrización. Por ello, también se utiliza en la reducción de algunos tipos de estrías.

A quién

Está indicado especialmente para mujeres y hombres que presentan un cuadro incipiente de flacidez y celulitis. En este tipo de casos es donde mejores resultados se obtienen. El equipo puede aplicarse a pacientes de todas las edades, ya que en casos de flacidez más acusada también se obtiene mejoría. El resultado depende del grado de flacidez (no tanto de la edad del paciente) y de la calidad de la piel. Sin olvidar su acción postquirúrgica.

Cómo

INDIBA® Deep Care es un sistema de radiofrecuencia distinto a todos lo que existen en el mercado. Así, el resto de equipos de radiofrecuencia tratan de introducir calor a la dermis por vía externa, atravesando la piel, para estimular las células de la dermis (fibroblastos), generar colágeno y tensar las fibras. En cambio, el equipo de INDIBA® emplea el propio calor endógeno del cuerpo y lo ‘sube’ a la dermis para lograr ese estímulo de los fibroblastos que fabricarán más colágeno y elastina, dándonos ese efecto tensor. De este modo, no hay que atravesar la piel, lo que evita quemaduras y aumenta la eficacia. Para el tratamiento postquirúrgico se trabaja en la función de atermia para el drenaje de la zona.

El protocolo que empleamos en nuestra clínica es de diez sesiones, aplicadas - las primeras sesiones - con una frecuencia de 2 o 3 por semana. Posteriormente recomendamos un mantenimiento.

Qué consigo

Con INDIBA® Deep Care conseguimos una mejora de la flacidez y la celulitis, con una eficacia que varía según la zona en que se va a trabajar y donde los resultados siguen mejorando a lo largo de los dos meses siguientes. Por ello, es importante informar bien al paciente. El tratamiento es especialmente efectivo en rostro, nalgas, muslos y pecho.